



メガネ用フェイスシールド型紙

- 1) 左側の線をクリアファイルの折り目側のへりに合わせて、点線に沿って切る。
- 2) メガネのツルを通す穴をパンチ穴あけ（またはハサミ）であける。
- 3) メガネのツルが太い場合はハサミで切り込みをいれて穴を広げる。

このメガネ・シールドでの感染予防の効果を実証はできていません。でも、

*飛沫防止の効果は、ある程度、期待できると考えています。

*あなたが感染予防の努力をしていることが表明できます。

2020年6月

千代田クリニック

吉田 友子